



眼科用手術用角板 アイシールド

眼瞼の施術時に角膜と瞼の間に挿入し角膜を保護します

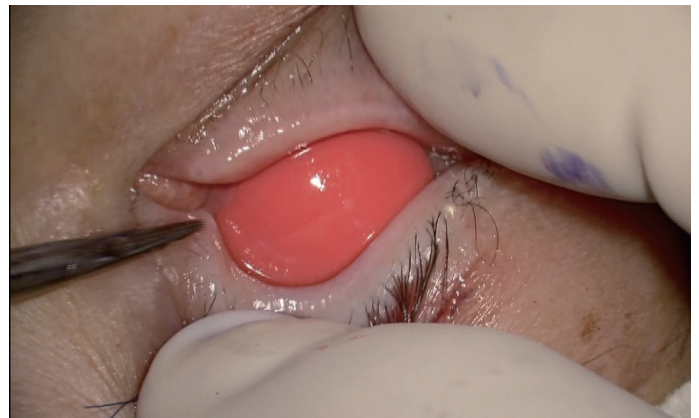

アイシールド 使用方法

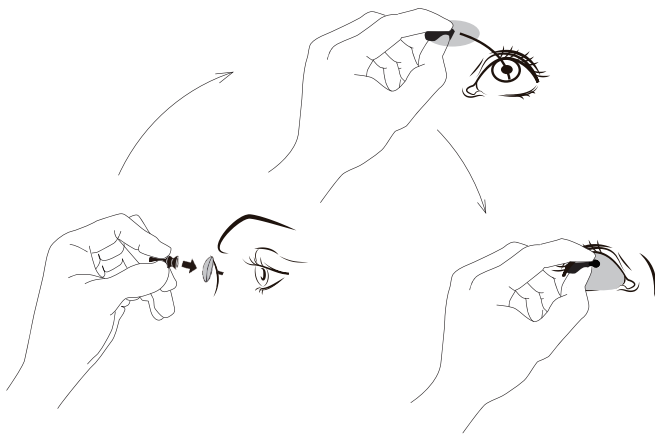

使用方法

- 1) 滅菌済の吸引スポイトを使用し、眼球を優しく覆うように本品を角膜と瞼の間に挿入する。
- 2) 施術後は吸引スポイトを使用し、本品を吸引し、ゆっくりと取り出す。
- 3) 使用後はすぐに洗浄、消毒、オートクレーブ滅菌を行う。

※本品は未滅菌のため、使用者が使用前に必ず洗浄、消毒、オートクレーブ滅菌を行うこと。

※本品に亀裂・傷、摩耗、変形等の破損がある場合は使用しないこと。






※本品の着脱には、付属品の吸引スポイトを使用し、鑷子は使用しないこと。

※本品を2歳以下の患者に使用しないこと。

※本品を60分以上使用しないこと。

※本品をレーザー手術時に使用しないこと。

眼科用手術用角板 アイシールド

種類	ES-01 アイシールド* (小)	ES-02 アイシールド* (中)	ES-03 アイシールド* (大)	ES-04 アイシールドセット (大・中・小)	ES-SH アイシールド用スポイト (2本入)
画像					
サイズ (±10%)	長径：16.0mm 短径：15.0mm 高さ：4.8mm	長径：19.5mm 短径：18.5mm 高さ：6.0mm	長径：23.5mm 短径：22.5mm 高さ：7.2mm		
内容物	アイシールド各サイズ4枚、吸引スポイト1本			アイシールド (大・中・小各2枚) 吸引スポイト1本	吸引スポイト2本
標準価格	30,000円 (税込33,000円)	33,000円 (税込36,300円)	35,000円 (税込38,500円)	35,000円 (税込38,500円)	3,800円 (税込4,180円)
材質	プラスチック (ポリカーボネート)				

販売名：アイシールド 一般的名称：眼科用手術用角板 (70944000) 医療機器届出番号：27B1X00031000013 一般医療機器 クラス分類I

Advanced with RF-KNIFE
SurgiNEXUS

サージネクサス

PRECISION VERSATILITY

精密さと多用途性を、一つ上の次元へ。



精密性と低侵襲を確立する、次世代ラジオ波メス

SurgiNEXUS – サージネクサス – は、長年の RF 技術開発で培った 4.0MHz/1.7MHz デュアル周波数と先進の RF アクセラレーター技術により、組織への侵襲を低く抑えながら高い手術精度を実現します。5つの専用モードで多様な手術ニーズに対応し、これまで蓄積してきた技術力と医師の専門技術が融合することで、従来の当社製品を超える手術品質を実現する次世代の精密手術を支えるデバイスです。

【製造販売業者】

 **NEXUS-Arc**

株式会社 NEXUS-Arc (ネクサスアーク)

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀一丁目 8-33

TEL : 06-6448-2511 FAX : 06-6448-2522 URL : <https://nexus-arc.co.jp/>