

獣医科：早見表

	電極の形状	モード	出力目安値	使用例
切開	 ワイヤー形状の電極 例:RF-FW110	CUT	低め 10 . . . 標準 15 . . . 高め 20	皮膚切開
		BLEND	低め 15 . . . 標準 20 . . . 高め 25	皮下組織切開
	 ニードル形状の電極 例:RF-EE010-D (直) RF-EE030-D (曲)	CUT	低め 15 . . . 標準 20 . . . 高め 30	皮膚切開
		BLEND	低め 20 . . . 標準 30 . . . 高め 40	皮下組織切開
		※凝固の場合COAG:20~40推奨		
	 ブレード形状の電極 例:EJ-CBS-26	CUT	低め 20 . . . 標準 25 . . . 高め 30	皮下組織切開
BLEND		低め 25 . . . 標準 30 . . . 高め 40	皮下組織切開	
※凝固の場合COAG:25~40推奨				
切除	 ループ形状の電極 例:RF-RL110	CUT	低め 15 . . . 標準 20 . . . 高め 30	バイオペシー
		BLEND	低め 20 . . . 標準 25 . . . 高め 35	腫瘍切除
凝固	 ボール形状の電極 例:RF-BE110	COAG	低め 10 . . . 標準 20 . . . 高め 30	凝固
	 鑷子形状の電極 例:J1	BIPOLAR	低め 2 . . . 標準 3 . . . 高め 20	止血 バイポーラカット
シーリング	 鉗子形状の電極 例:SCBI-01	BIPOLAR	低め 15 . . . 標準 20 . . . 高め 30	シーリング
	 鉗子形状の電極 例:RF-BC110	BIPOLAR	低め 15 . . . 標準 20 . . . 高め 50	シーリング
	 剪刀形状の電極 例:BS-01	BIPOLAR	低め 20 . . . 標準 30 . . . 高め 40	乳腺付近の切開 扁桃切除

※出力設定は目安となります。切開・凝固時の組織の変化を見ながら調整してください。

動画

獣医科ウェビナー



資料

参考テキスト

