

EMC変換アダプター接続方法

1. サージトロン EMC 本体に EMC 変換アダプター「EMC-CV」を接続します。



モノポーラ

2. 「対極板」と「ハンドピース」をそれぞれの接続口に接続します。



※ハンドピースの手元ボタンは使用できません。

3. 切替スイッチを Monopolar 側に倒します。




- 3-a. 対極板を患者様に接地します。



バイポーラ

2. 「バイポーラケーブル」を接続します。

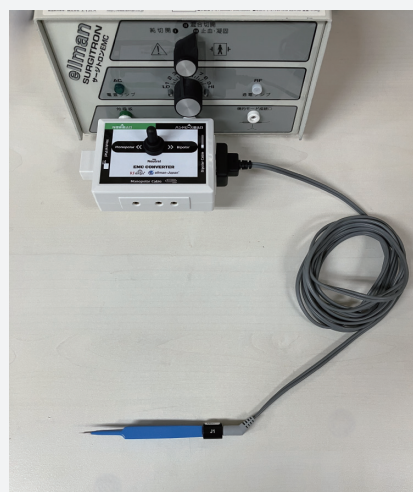

3. 切替スイッチを Bipolar 側に倒します。



4. フットペダルを踏んで出力します。



※本品の使用にあたっては、
本品の添付文書ならびにサ
ージトロン EMC 本体、対極板、
ハンドピース、バイポーラコー
ドの添付文書や取扱説明書を
よく読み使用してください。